

## Composition de la sacoche



## Remplissage


1/

### 1<sup>ère</sup> SOLUTION

#### GLAÇONS + EAU

Bien respecter la proportion et la quantité d'eau et de glaçons

(voir repères)

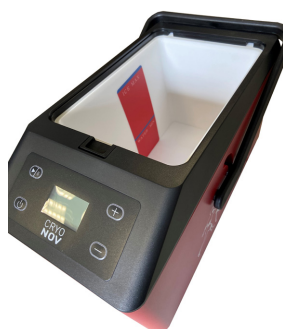

ou

### 2<sup>ème</sup> SOLUTION

#### PACK DE GEL + EAU

Bien respecter la quantité d'eau

(voir repères)



2/ Brancher les tuyaux connecteurs à l'appareil en façade et sur le manchon.  
Faire attention au sens de l'embout (détrompeur). Enfoncer à fond.

3/ Brancher l'alimentation électrique.

## Mise en route

Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton MARCHÉ / ARRÉT environ 3 à 5 secondes.



## Tableau des traitements

Mode	Pression	Durée
1	Basse de 0 à 60	20 mn
2		40 mn
3		60 mn
4	Moyenne de 0 à 90	20 mn
5		40 mn
6		60 mn
7	Elevée de 0 à 120	20 mn
8		40 mn
9		60 mn

Nous vous conseillons le **mode 5**.

En fin de traitement, bien éteindre l'appareil, en appuyant sur le bouton MARCHÉ / ARRÉT.

## Vidange de l'appareil et Retour

- Avant de nous retourner l'appareil, bien vider l'eau à l'intérieur du manchon à l'aide de la clé de vidange.
- Bien essuyer le bac réservoir.
- Remettre tous les accessoires dans la sacoche (voir point 1).

**Appelez-nous au 02 34 46 04 40 avant tout envoi !**