

# ICE COMPRESSION

## GUIDE D'UTILISATION MASQUE BAS DU VISAGE : MBVU

### IMPORTANT

Lisez l'intégralité de ce guide d'utilisation, y compris tous les avertissements, contre-indications et mises en garde avant d'utiliser votre attelle Ice Compression.

Ne pas suivre les instructions suivantes peut entraîner des blessures corporelles.

Les systèmes ICE COMPRESSION FIRST, ICE COMPRESSION DUO et MOOVE combinent les thérapies par le froid et par la compression. Ils sont destinés à traiter les soins post-chirurgicaux et les traumatismes aigus afin de réduire l'œdème et la douleur. Ils sont destinés à être utilisés par/sur ordre de professionnels de la santé agréés dans les établissements de santé, les établissements d'entraînement sportif ou prestataires à domicile.

Hauteur : 14 cm

Largeur : 28 cm


### APPLICATION DU MASQUE

Utilisable avec les systèmes suivants : ICE COMPRESSION FIRST, DUO et MOOVE



1 – Positionner le masque sur le visage puis passer les 2 lanières du haut au dessus de la tête en ayant positionné correctement la lanière sous le menton. Fixer les extrémités des 2 lanières sur la bande de tissu agrippant noir. Si nécessaire raccourcir la longueur des lanières élastiques en les coupant.

2 – Passer la sangle élastique du bas du masque derrière le cou et la passer dans l'œillet opposé afin de pouvoir fixer l'extrémité en tissu agrippant sur la sangle. sans trop serrer. Veillez à ce que l'attelle soit correctement ajustée et pas trop serrée pour ne pas causer de douleurs.

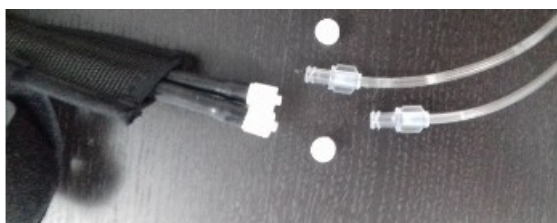

3 – Enlever les bouchons se trouvant sur les connecteurs du masque puis assemblez les aux connecteurs de la rallonge allant à la machine. Effectuez un quart de tour sans forcer.

4 - Vous pouvez alors allumer la machine, sélectionner l'attelle que vous venez de connecter et choisir le programme désiré.